

Attainment Company's

GoTalk[®]9+

la guía
del usuario

diodos emisores de
luz (LED) verdes que
indican nivel

micrófono

altavoz

teclas de
vocabulario esencial
12 segundos cada uno

teclas de mensaje
8 segundos cada uno en los cinco niveles

vista reversa

Botón para GRABAR

interruptor
de
encendido

borrar
nivel

compartimiento
para pilas

LED rojo de grabar
control de volumen

botón para
cambiar de nivel

protector incorporado
de teclas

encarte plástico

etiqueta de plantilla y
almacenamiento
de plantillas
(ayudas visuales/dibujadas
no incluidas)

tiempo total
de grabación:
8.5 minutos
(510 segundos)

tamaño: 23cm x 30,5cm x 2,9cm peso: 625g

instrucciones

para grabar las teclas de mensaje

¡Encienda el Comunicador GoTalk 9+ y oirá un pitido! Oprima y suelte el botón de grabar. Los LED de nivel (verde), y de grabar (rojo), se encenderán. Mientras estén encendidos, oprima y suelte la tecla de mensaje donde quiere grabar. Mientras oprima la tecla de mensaje, el LED de grabar parpadea para indicar que está grabando.

Cuando termine el mensaje, oprima cualquier tecla para terminar la grabación. Continúe a grabar cada mensaje o grabe el nivel entero. Cuando haya grabado todos sus mensajes (o el nivel entero/los niveles enteros), oprima y suelte el botón de grabar.




para escuchar un mensaje

Oprima y suelte una tecla de mensaje; la luz verde de nivel parpadeará. Se escuchará el mensaje que grabó.

niveles

Para cambiar de nivel, oprima y suelte el botón para cambiar de nivel que se ubica debajo de los LED verdes. El LED verde que indique el nivel actual parpadeará. Oprímalo otra vez para cambiar a otro nivel. Inserte la plantilla que corresponda al nuevo nivel.

Para borrar nivel, oprima y suelte el botón para grabar que se ubica en el respaldo del aparato. Pulse el botón para cambiar el nivel al nivel que quiere borrar. Inserte la punta de un bolígrafo o un clip en el agujerito (Borrar Nivel) que se encuentra en el respaldo del equipo. Se borrará el nivel entero. Repita estos pasos para borrar otros niveles. Borrar el nivel no borra las palabras o frases esenciales del vocabulario.

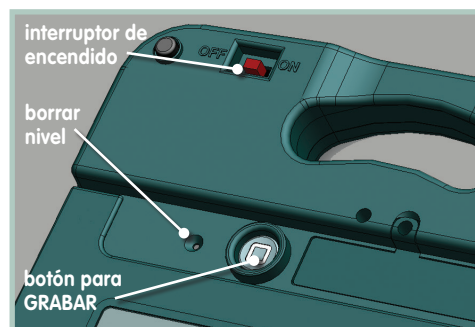

vista reversa



las características de la cerradura

Eliminar el uso no deseado de estos botones.

- **Cerradura de nivel**—para activar la cerradura de nivel, siga estas instrucciones: oprima y sujete el botón de grabar en el respaldo del aparato. El LED de grabar (rojo) y el LED de nivel (verde) se encenderán. Mientras todavía esté oprimiendo el botón de grabar, oprima y suelte el botón de volumen (bajo). El LED de grabar y el LED de nivel se apagaran para mostrarle que la cerradura de nivel está encendida.
- **Cerradura de grabar**—para activar la cerradura de grabar: oprima y sujete el botón de grabar en el respaldo del equipo. El LED de grabar (rojo) y el LED de nivel (verde) se encenderán. Mientras todavía oprima el botón de grabar, oprima y suelte el botón de volumen (alto).

Para deshacer la cerradura de nivel y de grabar, apague el aparato. Mientras está apagado, sujete el botón de grabar y encienda el aparato. La luz del LED verde se enciende y pasa por cada nivel, y el LED de grabar se enciende brevemente y emite un pitido.

vocabulario esencial

3 teclas de mensajes esenciales de vocabulario

Siga las instrucciones arriba para grabar un mensaje. Los mensajes esenciales de vocabulario permanecen constantes en cada nivel hasta que usted los borre y grave un nuevo mensaje.

Ponga una
foto del
estudiante
aquí



el autobús escolar



Escuchar



tamaño actual de las teclas de mensajes esenciales

¡Estos 3 mensajes pueden ser adaptados para funcionar en cualquier situación!

idea uno

Hola

Descanso

Adiós

idea dos



**Pase a otra
plantilla**

El vocabulario esencial debe ser usado para mensajes que son comunicados frecuentemente. Estos mensajes pueden incluir saluciones, comentarios, preguntas comunes, o necesidades básicas. Los mensajes del vocabulario esencial permanecerán los mismos en cualquier nivel.

crear plantillas

software de plantillas para el Comunicador GoTalk™ (GoTalk Overlay Software)

¡Crear plantillas es fácil con software de plantillas para el GoTalk (GoTalk Overlay Software)! Este software incluye más de mil fotos e ilustraciones. Además, usted puede pegar sus propias imágenes en cualquier plantilla. Las celdas vacías de la plantilla pueden contener una imagen, un texto (en cualquier lengua) o ambos. Las características de editar permiten que usted cambie el color, el tamaño, y la letra del texto. Mueva, amplíe, gire, y recorte fotos. Las plantillas están incluidas con todos los productos GoTalk. Ahorre archivos de plantillas y comparta con otros usuarios de GoTalk. (Los productos GoTalk y el software de plantillas para el GoTalk se venden por separado).

ideas de implementación

Puede usar su GoTalk 9+ para muchas actividades. Aquí hay solamente algunas de las posibilidades:

- aparato de comunicación expresiva y aumentativa
- actividades modificadas de currículo
- proporcionar ayudas visuales y auditivas del lenguaje
- dar instrucciones por ambientes o trabajos
- usar en un programa de inglés como segundo idioma (ESL)

ideas




plantillas

¡Hay muchas maneras de hacer plantillas para el GoTalk 9+!

- usar el software de plantillas para el GoTalk (GoTalk Overlay Software)
- escribir palabras en una plantilla blanca con un marcador
- cortar/pegar fotos o ayudas de símbolos en la plantilla
- poner velcro en cada cuadro y añadir/pegar una ayuda de textura para las personas con discapacidades visuales

compartimiento para el almacenamiento de plantillas

Ahora puede almacenar por lo menos una plantilla para cada nivel en el compartimiento para el almacenamiento de plantillas. ¡Esto se lo hace más fácil cambiar plantillas cuando cambia ambientes o temas de conversación! Almacene su guía del usuario aquí también.

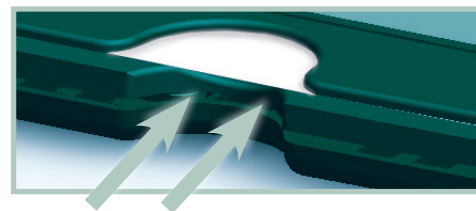

Attainment Company, Inc.

P.O. Box 930160 • 504 Commerce Parkway
Verona, WI 53593-0160 • USA • Teléfono 1-800-327-4269
LLAMADAS INTERNACIONALES 1-608-845-7880

www.AttainmentCompany.com