## **GoTalk NOW**





# Guida per l'utente

## Indice

1	Iniziare ad usare GoTalk NOW	1
	1.1 AVVIO RAPIDO	
2	Utilizzare l'utente creato con GoTalk NOW	
3	Come modificare le pagine	
J	3.1 Aggiungere nuove pagine a un libro	
	3.1.1 Procedura guidata di pagina	
	3.2 Impostare le opzioni per la pagina	
	3.3 Etichette di pagina	
	3.3.1 Titolo etichetta pagina	
	3.3.2 Icona etichetta pagina	
	3.3.3 Segnali acustici per le pagine	
	3.4 Creazione di un messaggio	
	3.4.1 Colori di sfondo e bordo	
	3.4.2 Testo pulsante	10
	3.4.3 Aggiungere immagini a una posizione del messaggio	11
	3.4.4 Modifica un'immagine	
	3.4.5 Aggiungi azioni a una posizione del messaggio	13
	3.4.6 Segnali acustici di anteprima per i messaggi	
	3.4.7 Copia, incolla, scambia rimuove, o nascondi le posizioni dei messaggi su una pagina	
	3.5 Pulsanti rapidi	
	3.6 Gestisci pagine e modelli	
4	Creazione di pagine di comunicazione con una scena interattiva	
	4.1 Aggiungi dei messaggi in la pagina di comunicazione con una scena interattiva	16
5	Usare le pagine della tastiera	. 18
6	Utilizzo di Pagine Express	. 19
	6.1 Aggiunta di Pagine Express al tuo libro per la comunicazione	19
	6.2 Utilizzo della barra dei messaggi in modalità Utente	19
	6.3 Caratteristiche opzionali della Pagina Express	
	6.4 Condivisione del contenuto della barra dei messaggi	20
7	Creazione e condivisione di modelli di pagina	.21
	7.1 Crea un modello	
	7.2 Condividi i modelli tramite e-mail	
	7.3 Condivisione Online Gallery	
	7.4 Usa pagine prefabbricate gratuite dalla Galleria online	
8	Creazione, rimozione e condivisione di libri per la comunicazione	
	8.1 Condivisione della trasmissione su una rete WiFi	
	8.2 Condivisione con AirDrop o e-mail	
	8.3 Esportazione di un libro di comunicazione come pagine PDF	
9	Esecuzione del backup dei tuoi libri per la comunicazione	
	9.1 Backup sul computer con iTunes	
	9.1.1 Backup sul computer tramite il Finder	
	9.2 Backup con Dropbox o Google Drive	
	9.3 Opzione aggiuntive di backup su Cloud	
	Selection Scanning and Switch Access Support	
11	Impostazioni delle app di GoTalk NOW	
	Scarica di GoTalk	.38
	Contatti e Informazionin	.39

### Iniziare ad usare GoTalk NOW

Apri il PDF della Guida per l'utente nell'app iBooks per la visualizzazione di pagine intere e la ricerca di testo.

Utilizza **GoTalk NOW**® per creare libri per la comunicazione dotati di pulsanti/celle per messaggi interattivi. Oppure usa un'immagine per creare una pagina di scena con gli hotspot dello schermo che riproducono i messaggi (Interactive Visual Scenes—Scene visive interattive). Utilizza le pagine della tastiera per digitare messaggi con previsione di parole incorporata e sintesi vocale.

Il pulsante **Aiuto** nella schermata Home fornisce informazioni tramite la guida utente e video tutorial. Il modo migliore per imparare ad utilizzare **GoTalk NOW** è iniziare creando le proprie pagine di comunicazione. Utilizza le istruzionie **AVVIO RAPIDO** fornite di seguito per imparare le basi.



 ${
m Fig.\,1-1}~$  Una pagina di comunicazione GoTalk con quattro messaggi. Un tocco su u messaggio può riprodurre audio o video, navigare in una nuova pagina o aprire una pagina web.



Fig. 1-2 Il titolo del libro selezionato appare nella parte inferiore della schermo nella schermata principale del programma (HOME). GoTalk NOW LITE e GoTalk Start non mostrano nessun titolo, in quanto sono limitati a un singolo libro.

#### 1.1 AVVIO RAPIDO

1. Premere Modifica Pagina nella schermata Home. Se non sono stati ancora creati dei libri, si aprirà la prima pagina predefinita di Libri.



Fig. 1-3 Utilizzare il pulsante **Modifica pagina** per aggiungere **dei messaggi** alla pagina. Una pagina può essere divisa in 1, 2, 4, 9, 16, 25 o 36 messaggi. Ogni pulsante può avere un aspetto e un'azione diversa. Una cella nella pagina può essere lasciata vuota senza nessun messaggio



Per limitare l'accesso all'editor di pagine, inserisci un codice/ password per uscire dal lettore (vedi impostazioni dell'app, pagina 35). Section 1
Getting Started
with GoTalk NOW

- 2. Premere l'icona Impostazioni Pagina della barra degli strumenti. Utilizza il pulsante Impostazioni per regolare il numero dei messaggi nella pagina. Usa il pulsante Sfondo per scegliere un colore di sfondo per la pagina. L'interruttore abilita deve essere attivato affinché la pagina possa essere inclusa nel libro.
- 3. Premere uno dei pulsanti Posizione messaggio. Il "Pulsante testo" apparirà sul pulsante selezionato come testo predefinito per quel messaggio. Gli strumenti di modifica appariranno sullo schermo per modificare il testo, cambiare l'aspetto del pulsante e aggiungere azioni.



Fig. 1-4 La scheda delle **Opzioni Pagina** fornisce le impostazioni per il colore di sfondo della pagina e il numero dei messaggi sulla pagina. **Abilita** deve essere impostato su "on" (icona verde) per visualizzare la pagina per l'utente. Vedere pagina 14 per informazioni sulla **scansione con suoni (anteprima audio).** Vedere a pagina 19 per informazioni sulla funzione **Pagina Express**.



Fig. 1-5 La cella/pulsante, se selezionata nella pagina per la modifica, viene ingrandita per facilitarne la modifica. È possibile regolare il colore di sfondo, il colore del bordo, il contenuto del testo e le immagini. Ad un messaggio deve essere assegnata almeno un'azione. (Sintesi vocale per riprodurre il testo del pulsante è l'azione predefinita.)

4. Con il pulsante del messaggio selezionato, utilizzare gli strumenti Sfondo e Bordo per selezionare i colori del messaggio. Utilizza il Pulsante impostazioni Testo per modificare l'etichetta di testo, modificare le dimensioni del testo, lo stile del carattere e il colore del testo. Può essere aggiunto un effetto ombra esterna.



Fig. 1-6 La cella Testo pulsante fornisce le impostazioni per apportare modifiche all'etichetta di testo nella cella.

## Section 1 Getting Started with GoTalk NOW



Per utilizzare simboli e illustrazioni

dalla Libreria di immagini GoTalk, andare nel Negozio di GoTalk NOW dalla schermata Home. La libreria di immagini Attainment (in inglese) è gratuita per gli utenti di GoTalk NOW.



5. Con il pulsante del messaggio selezionato, utilizza il pulsante Aggiungi Immagine per aggiungere un'immagine al messaggio. Più di una immagine può essere aggiunta. Trascina con il dito per posizionare l'immagine. Ridimensiona un'immagine stringendo e allargando l'immagine con le dita.



Fig. 1-7 Il pulsante **Aggiungi Immagine** contiene le impostazioni per aggiungere una o più immagini a una posizione del messaggio.

- 6. Con il pulsante del messaggio selezionato, premere il pulsante rosso Azione per assegnare un'azione. Sintesi Vocale è l'azione predefinita, la quale leggerà quindi il testo a voce alta. Registrazione Audio consente di utilizzare il microfono dell'iPad per registrare un messaggio vocale. Altre azioni disponibili includono Vai alla Pagina (vai a una diversa pagina di comunicazione), Media Player (riproduci l'audio dall'elenco dei brani iPad), URL (apri una pagina web), GoVisual (avvia l'app Attainment's GoVisual e apri una scena), Controllo della Luminosità HUE o Video.
- 7. Premere il pulsante Fatto per salvare il messaggio nella pagina.
- 8. Premere il pulsante **Titolo della Pagina** nella parte inferiore della schermata di modifica pagina per modificare il titolo della pagina o aggiungere un'immagine accanto al titolo. Premi **Imposta Font** per apportare modifiche al testo e premi il pulsante **Icona** per aggiungere un'immagine. La funzione **Segnale sonoro** è spiegata a pagina 13 (e Figura 3-15). Premere **Fatto** una volta terminata la modifica del titolo della pagina.
- 9. Per aggiungere una nuova pagina vuota, premere il pulsante e selezionare **Aggiungi Pagina Vuota** dal menù **Nuova Pagina**. Se il tuo libro ha più pagine, troverai il pulsante "+" nell'ultima pagina del libro.
- 10. Tocca il pulsante Pulsanti Rapidi per aggiungere fino a quattro messaggi che saranno disponibili in tutto il libro (nelle Impostazioni è possibile selezionare fino a 8 messaggi fissi per ogni pagina nelle Caratteristiche sperimentali). Tocca un punto qualsiasi della pagina per chiudere i Pulsanti rapidi. Ulteriori informazioni sul Pulsanti rapidi sono disponibili a pagina 15.
- **11.** Tornare alla schermata Home e premere **Utente** per aprire il tuo libro per la comunicazione. Vedere pagina 4 per ulteriori informazioni su **GoTalk NOW** Player (Utente).

Un PDF stampabile di questa guida dell'utente è disponibile sul sito Web di Attainment Company: https://www.attainmentcompany.com/gotalk-now

## **(i)**

Per uscire dal lettore, utilizzare

scorrimento con tre dita dall'alto verso il basso sullo schermo dell'iPad o tenere premuto il pulsante Home per otto secondi. Dal menu delle Impostazioni può essere aggiunta una password di quattro cifre per uscire dalla modalità Utente (la password di default è 0000).



#### GoTalk NOW LITE e GoTalk Start

sono limitati a un singolo Libro di Comunicazione. Quando si utilizzano queste app, il titolo del libro non verrà visualizzato nella parte inferiore della schermata principale.

Tocca l'icona
Feedback
nell'angolo
in basso a sinistra
della schermata
Home per inviare per
email, una domanda
o un commento al
team di supporto di
GoTalk NOW.

## GoTalk NOW Modalità Utente

Dopo aver creato un Libro per la Comunicazione con una o più pagine, premere il pulsante Utente sulla schermata Home per poter utilizzare il vostro Libro. Il titolo del libro selezionato verrà mostrato nella parte inferiore della Schermata Home. Per scegliere un altro libro, premere sul titolo del libro in fondo alla Schermata Home. Se si utilizza GoTalk NOW LITE o GoTalk NOW Start, si avrà a disposizione solo un libro di comunicazione.

Dalla schermata Home, premere il pulsante Utente.
 Utente Si aprirà il libro di comunicazione selezionato.



Fig. 2-1 Aprire un libro per la comunicazione premendo il pulsante **Utente** nella schermata Home..

• Premere il Messaggio/cella nella pagina per selezionare e riprodurre le azioni assegnate.



- Utilizzare i pulsanti di navigazione sinistra 🔾 / destra 🜔 per sfogliare le pagine.
- Premere il pulsante Home per tornare alla prima pagina del libro. Tenere premuto il tasto
   Home per 5 secondi per tornare al Menu principale.
- Premere il pulsante **Indietro** per tornare alla pagina visualizzata in precedenza.
- Premere il pulsante Salta a per aprire un elenco di pagine disponibili, quindi toccare una pagina per andare lì
- Tocca il pulsante Pulsanti Rapidi per utilizzare i messaggi delle Pulsanti rapido (consulta pagina 15 per ulteriori informazioni sull'aggiunta di messaggi di Pulsanti rapido a un libro).



Fig. 2-3 Tocca il pulsante **Pulsanti rapidi** (messaggi fissi per ogni pagina) per utilizzare ulteriori messaggi.



## Come modificare le pagine

Per uscire da Modifica Pagina,

tocca il pulsante Home o usa uno scorrimento con tre dita verso l'alto sullo schermo dell'iPad. Per limitare l'accesso alle modifiche durante l'uso da parte dello studente, aggiungi una password (vedere impostazioni dell'app, pagina 35). Toccare il pulsante **Modifica pagina** sulla schermata Home per creare e modificare le pagine per la comunicazione.



Fig. 3-1 Utilizza **Modifica pagina** per aggiungere dei **messaggi alla pagina**. Una pagina può essere divisa in 1, 2, 4, 9, 16, 25 o 36 posizioni dei messaggi. Ogni messaggio può avere un aspetto e un'azione differenti. Una pagina può anche non utilizzare tutti i pulsanti disponibili per i messaggi. È possibile aggiungere fino a quattro ulteriori messaggi di Pulsanti rapidi a un libro (vedere pagina 15 per informazioni sull'utilizzo del Pulsanti rapidi).

#### 3.1 Aggiungere nuove pagine a un libro

Le nuove pagine vengono aggiunte al libro per la comunicazione dal menu **Nuova Pagina**, che offre diverse modalità. Apri il pulsante "+" al menu della Nuova Pagina che appare nell'ultima pagina di un libro. Le opzioni, elencate dal basso verso l'alto:

- Pulsante Aggiungi pagina vuota. Inserisci una pagina vuota per aggiungere nuovi messaggi.
- Aggiungi pagina Scena vuota. Utilizzare
  un'immagine per il contenuto della pagina (scena
  interattiva) anziché singoli messaggi. Aggiungi
  l'hotspot sensibile al tocco all'immagine (vedi
  pagina 16).
- Pagina tastiera. Consenti agli utenti esperti di digitare i messaggi utilizzando la tastiera iPad con la previsione delle parole incorporata. I messaggi completati vengono riprodotti con la sintesi vocale da testo a voce. (vedi pagina 18).
- Procedura guidata di pagina. Immettere gli elementi di testo per creare rapidamente un set di messaggi per la pagina (vedere la sezione 3.1.1 di seguito).
- Pagina duplicata. Copia una pagina dal libro e modifica le posizioni dei messaggi esistenti.
- Importa da un altro libro. Copia una pagina da un altro libro.
- Modelli Scaricati, I Miel Modelli, Galleria Online. Usa le pagine prefabbricati dalla tua raccolta di modelli o dalla Galleria online di modelli (vedi pagine 21-24).



Fig. 3-2 Diversi metodi per aggiungere nuove pagine sono disponibili dal menu **Nuova Pagina**. Il menu **Nuova Pagina** viene aperta con il pulsante "+" che trovate in fondo a destra della pagina, oppure tramite il pulsante "Gestisci pagine e modelli" e selezionando "+" in alto a sinistra della scritta "Pagine".



#### 3.1.1 Procedura guidata di pagina

Procedura pagina guidata è un impostazione di **GoTalk NOW** che semplifica la creazione di una pagina per la comunicazione e l'aggiunta del testo a tutte le posizioni dei messaggi. In base al numero di voci di testo dei pulsanti aggiunti, la Creazione Guidata genera una pagina con 1, 2, 4, 9, 16, 25 o 36 posizioni dei messaggi. Una pulsante vuoto posizionerà uno spazio vuoto sulla pagina al posto di un messaggio

Se si seleziona Aggiungi immagini dalla libreria prima di digitare le voci di testo dei pulsanti, la Creazione Guidata aggiungerà automaticamente le immagini ai messaggi dalla libreria di immagini selezionata. Se non viene trovata alcuna corrispondenza, verrà visualizzato solo il testo del pulsante nel messaggio

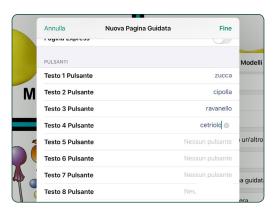


Fig. 3-3 Aggiungi un pulsante di testo fino ad un massimo di 36 pulsanti con la **Creazione pagina guidata**, quindi premi **Fine** per creare una pagina con tutti i messaggi richiesti.

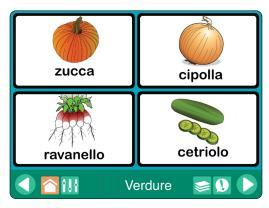


Fig. 3-4 Utilizza l'opzione **Aggiungi immagine dalla Libreria** per aggiungere automaticamente le immagini relative al testo nei messaggi. Se non viene trovata alcuna corrispondenza, verrà visualizzato solo il testo nella cella del messaggio.

#### 3.2 Impostare le opzioni per la pagina

Il pulsante **Opzioni pagina** viene utilizzato per controllare il layout e l'aspetto di una pagina per la comunicazione



Fig. 3-5 Utilizzare il pulsante **Opzioni pagina** per regolare le funzioni della pagina.

**Sfondo.** Scegli un colore di sfondo della pagina. Puoi scegliere tra le opzioni di colori campioni già forniti o utilizzare lo strumento di selezione dei colori.

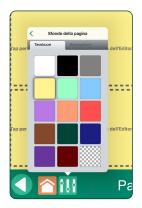


Fig. 3-6 Selezionare il pulsante "Tavolozze" per impostare il colore di sfondo desiderato.



Fig. 3-7 Selezionare il pulsante "Raccoglitore" dove trovate gli strumenti per poter impostare la tonalità di colore più precisa per le vostre esigenze. In alto potete scegliere i colori e in basso la tonalità chiara o scura.

• Pulsanti. Selezionare il numero di messaggi consentiti nella pagina di comunicazione: 1, 2, 4, 9, 16, 25 o 36.



Fig. 3-8 Una pagina di comunicazione può contenere 1, 2, 4, 9, 16, 25 o 36 celle/messaggi.



La scansione degli avvisi acustici

viene visualizzata solo come Opzione pagina quando nella pagina sono presenti quattro o più messaggi.



Se alla pagina è stata

assegnata una configurazione, il pulsante di Apulsante di Attivazione automatica viene visualizzato come un'impostazione aggiuntiva nella pagina Opzioni. Quando l'attivazione automatica è abilitata, questa opzione sarà automaticamente attivata quando verrà aperta la pagina.

- Scansione dei segnali acustici. Assegna segnali acustici a righe o colonne per la navigazione e la selezione dello schermo. Selezionare Raggruppamento nelle impostazioni dell'app per la scansione di righe o colonne quando i segnali acustici sono abilitati nelle impostazioni dell'app.
- Abilitato. Attiva questa impostazione per includere la pagina in un libro e mostrarla nell'Utente. Disattiva questa impostazione per escludere la pagina (la pagina non verrà mostrata all'utente).
- aggiungere la barra di comunicazione per quella
- Pagina Express. Attivare questa impostazione per scansione uditiva. pagina. Disattiva le impostazioni per rimuovere la barra di comunicazione.

• Scansione specifica per pagina. Sostituisce l'impostazione per la selezione dei pulsanti per righe,

colonne o altri gruppi, solo sulla pagina corrente (vedere Impostazione raggruppamento, pagina 35).



Fig. 3-9 **Segnali acustici** per le righe: ogni riga di una pagina può utilizzare un audio registrato o un'indicazione di sintesi vocale quando è in uso la



Fig. 3-10 Segnali acustici per le colonne: ogni colonna di una pagina può utilizzare un audio registrato o una segnalazione da sintesi vocale quando viene utilizzata la scansione uditiva.



#### 3.3 Etichette di pagina

L'etichetta di pagina viene visualizzata nella parte inferiore di una pagina per la comunicazione, può avere un titolo, un'icona o entrambi. L'area Etichetta di pagina può anche essere lasciata vuota. Per impostazione predefinita, il numero di pagina viene utilizzato come titolo della pagina. L'icona di una pagina viene visualizzata solo se aggiunta. Per apportare modifiche all'etichetta della pagina o aggiungere un segnale acustico per la pagina, toccare l'area dell'etichetta dalla schermata di modifica.



Fig. 3-11 Come impostazione predefinita, il numero di pagina viene utilizzato per il **titolo dell'etichetta** della pagina.

#### 3.3.1 Titolo etichetta pagina

Un titolo di pagina viene visualizzato nella parte inferiore di ciascuna pagina per la comunicazione. I titoli di pagina vengono anche utilizzati per l'elenco di collegamenti di pagine **Vai a**. Utilizzare il campo di immissione del testo per modificare o rimuovere il testo dell'etichetta. Tocca il pulsante **Imposta carattere** per modificare la dimensione del testo e lo stile del carattere.



Fig. 3-12 Toccare l'etichetta della pagina e utilizzare il **campo di immissione del testo** per modificare o rimuovere il titolo di una pagina.

#### 3.3.2 Icona etichetta pagina

Un'immagine può essere aggiunta all'etichetta della pagina toccando lo spazio dell'etichetta accanto al titolo della pagina. Le immagini sono disponibili dalla libreria immagini GoTalk, tramite una ricerca su Internet, dalla libreria di foto iPad o da una nuova foto scattata con la fotocamera dell'iPad.



Fig. 3-13 Toccare l'**Icona della pagina** per aggiungere un'immagine all'etichetta della pagina. Le immagini possono essere aggiunte dalla libreria di immagini di GoTalk, da una ricerca su Internet o dalla libreria di foto di iPad. Puoi anche usare la fotocamera dell'iPad per creare un'immagine icona.



#### 3.3.3 Segnali acustici per le pagine

The Page Label tools include the **Auditory Cue** button for adding an auditory cue to a page. The cue may be created with the Text-to-Speech player or with the audio recorder. When Auditory Cues is turned on in the app settings, the audio page cue will be heard when the Communication Page is opened.



Fig. 3-14 È possibile creare un'Action Page Cue per una pagina con il **registratore audio.** 



Fig. 3-15 Un a pagina con un suono di anteprima può essere creata con il pulsante "Segnale sonoro". E' possibile poi aggiungere un audio registrato o **usare la sintesi vocale.** 

#### 3.4 Creazione di un messaggio

Per aggiungere un messaggio a una pagina per la comunicazione, iniziare selezionando uno dei pulsanti di pagina non assegnati. Il nuovo messaggio avrà un bordo nero, uno sfondo bianco e le parole "Testo pulsante" come testo segnaposto.

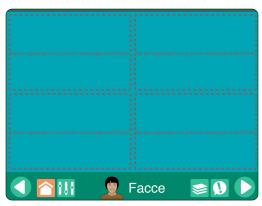


Fig. 3-16 Toccare un pulsante nella pagina per creare un messaggio.

#### 3.4.1 Colori di sfondo e bordo

I colori dello sfondo e del bordo possono essere diversi per ogni messaggio. Il colore del bordo può corrispondere al colore di sfondo o essere di un colore diverso. Usa **Sfondo** e **Cornice** comice per cambiare i colori per i tuoi messaggi.

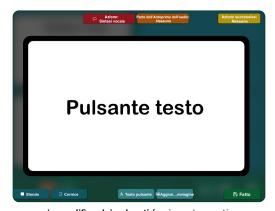


Fig. 3-17 La **modifica dei pulsanti** fornisce strumenti per modificare l'aspetto e aggiungere funzionalità ad un messaggio. Le parole "Testo pulsante" appaiono come testo di anteprima.

#### 3.4.1 Colori di sfondo e bordo (continua)



Fig. 3-18 Usa i pulsanti Sfondo e Cornice per scegliere i colori per il messaggio. **La scheda Tavolozze** offre una serie di scelte di colore standard. In basso a destra, la scelta del pulsante con motivo a quadretti, memorizza il colore di sfondo selezionato da utilizzare quando si assegna il colore del testo o del bordo.



Fig. 3-19 Per utilizzare colori personalizzati, utilizzare la scheda Raccoglitore. Oppure utilizzare il pulsante Imposta via esadecimale per immettere un valore esadecimale del colore. La regolazione del chiaro / scuro per un colore può essere regolata con il controllo del cursore nella barra in basso.

#### 3.4.2 Testo pulsante

Premi il pulsante **Testo pulsante** A Testo pulsante o tocca due volte il testo di un messaggio aperto per utilizzare le impostazioni di regolazione del testo. Digita il testo da mostrare. La dimensione del testo, lo stile del carattere e il colore possono essere modificati.



Fig. 3-20 II testo che sarà visualizzato nel messaggio viene regolato attraverso le impostazioni della cella **Testo** pulsante.



Fig. 3-21 Premi **Testo** per aggiungere o rimuovere una parola o una frase per il messaggio. Questa opzione si aprirà anche toccando due volte "Testo pulsante" nella cella del messaggio.



Fig. 3-22 Possono essere inserite nel testo del messaggio delle **Linee di testo separate**, digitando i caratteri ## all'inizio di una nuova riga.



Fig. 3-23 Regola la **dimensione** del testo del messaggio con il controllo del cursore. Puoi anche modificare la dimensione del testo pizzicando o allungando il testo con le dita.

#### 3.4.2 Testo pulsante (continua)

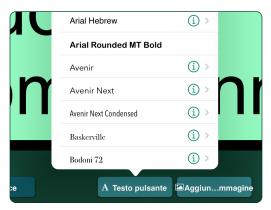


Fig. 3-24 Per cambiare lo stile del testo, tocca l'impostazione **Carattere** e scegli uno stile di carattere disponibile.



Fig. 3-25 Utilizza le schede Tavolozze o Raccoglitore per scegliere un **Colore per il testo**. In basso a destra, la scelta del campione di modello di griglia selezionerà il colore di sfondo corrente.

#### 3.4.3 Aggiungere immagini a una posizione del messaggio

Utilizza il pulsante **Aggiungi immagine** per aggiungere una o più immagini ad un messaggio. Le immagini possono essere ottenute dalla libreria di immagini GoTalk, da una libreria di simboli PCS e/o Widgit (se acquistate o già incluse nella vostro dispositivo), dalla libreria fotografica del tuo iPad o da una ricerca su Internet. Puoi anche utilizzare la fotocamera dell'iPad per scattare una foto da inserire in una cella per il messaggio.



Fig. 3-26 T Tocca il pulsante **Aggiungi immagine** per posizionare un'immagine all'interno del pulsante del messaggio. E' possibile scegliere tra "Cartella immagini GoTalk" (simboli Attainment in lingua inglese), PCS ITA o Widgit ITA o ricerca in Internet (è necessario che il dispositivo sia connesso ad internet), Scatta una foto o Dalla cartella immagini (per usare immagini già presenti nel vostro dispositivo). *Il numero delle Librerie dei simboli dipende da quelle che avete acquistato o che sono già presenti nel vostro dispositivo*.

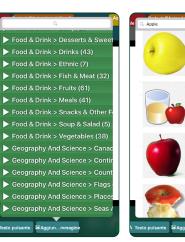


Fig. 3-27 **Le libreria di immagini GoTalk NOW** hanno oltre 4.000 immagini tra cui scegliere. Scorri le categorie o inserisci una parola chiave nel campo di testo per restringere le scelte.



Fig. 3-28 Lo strumento di **ricerca su Internet** ricerca le immagini disponibili da Bing.com. Utilizza il campo di testo per inserire parole chiave per la ricerca di immagini.

#### 3.4.3 Aggiungere immagini a una posizione del messaggio (continua)





Fig. 3-29 Più di un'immagine può essere aggiunta nella cella del messaggio.

#### 3.4.4 Modifica un'immagine

Un'immagine collocata su un messaggio può essere ingrandita, ridotta, ritagliata, spostata e ruotata. Tocca due volte o tocca e tieni premuto su un'immagine per aprire la scheda **Modifica immagine**.



Fig. 3-30 Toccare e tenere premuta un'immagine per aprire le impostazioni di **Modifica immagine** per ritagliare (Dividere), eliminare (Cancella immagine) o per portare un'immagine in primo piano rispetto ad altri oggetti (Bring to Front). Tocca **Ripristina Posizione** per tornare al posizionamento dell'immagine originale. Tocca Salva sull'Album di foto per memorizzare l'immagine nella Libreria foto dell'iPad.







Fig. 3-31 **Riposiziona un'immagine** nella cella del messaggio con un dito. Ridimensiona un'immagine con un pizzico o allarga il gesto sullo schermo. Per **ruotare un'immagine**, utilizzare due dita e poi puoi ruotare l'immagine in entrambe le direzioni.



## 3.4.5 Aggiungi azioni a una posizione del messaggio

Utilizzare il pulsante Azione per aggiungere comportamenti multimediali a un messaggio. Un messaggio audio può essere aggiunto con le opzioni Registra Audio o Sintesi vocale. Vai alla pagina, può trasformare la posizione del messaggio in un pulsante di navigazione. Media Player è utilizzato per riprodurre l'audio dall'elenco dei brani di iTunes. L'azione URL assegna l'apertura di una pagina Web per il messaggio; da aprire con il browser web dell'iPad (l'iPad deve avere una connessione Internet). L'azione avvia GoVisual apre l'app Attainment's GoVisual e apre la scena scelta. L'azione Video trasforma il messaggio in un pulsante di riproduzione video.

Un messaggio che utilizza un messaggio audio registrato o la sintesi vocale consente di aggiungere una seconda azione, la quale sarà eseguita dopo la riproduzione del messaggio. Dopo aver aggiunto un messaggio audio al messaggio, premi il pulsante

Azione successiva

Azione successiva

Azione successiva

Der aggiungere una delle quattro azioni possibili:

- Non fare niente
- Vai alla pagina successiva del libro
- Torna indietro (pagina precedente)
- Vai ad una pagina specifica

Il pulsante **Controllo della Luminosità Hue** è utilizzato per il controllo WiFi dei sistemi di illuminazione quando disponibili. I prodotti tecnologia necessari per questo sistema di controllo dell'illuminazione ambientale devono essere acquistati separatamente.



Fig. 3-32 Toccare il pulsante **Azione** per aggiungere una registrazione audio o sintesi vocale ad un messaggio.

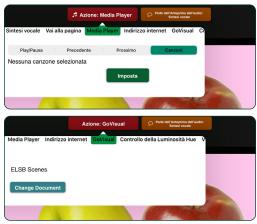


Fig. 3-33 Una cella/messaggio può anche essere utilizzata per riprodurre un brano o mostrare un video. Usa l'azione **Media Player** per scegliere una canzone dall'elenco dei brani iPad. Usa l'azione **GoVisual** per avviare una scena con GoVisual.



Fig. 3-34 Utilizzare l'azione **Vai alla pagina** per utilizzare il messaggio come pulsante di navigazione (per poter aprire un'altra pagina una volta selezionato senza emettere nessun suono).

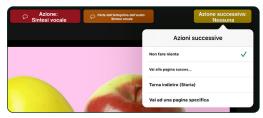


Fig. 3-35 Toccare il pulsante **Azione successiva** per aggiungere una seconda azione che si verifica dopo la riproduzione del messaggio audio presente nel messaggio.

## 3.4.6 Segnali acustici di anteprima per i messaggi

Utilizzare il pulsante **Segnali acustici** per aggiungere un'indicazione acustica ad un messaggio. Un segnale acustico verrà riprodotto quando viene selezionato il messaggio. Il segnale può essere registrato con il microfono o usando la sintesi vocale e verrà riprodotto solo se attivato nelle impostazioni principali dell'app.

Le segnalazioni acustiche aggiunte ai messaggi possono aiutare la comunicazione per molteplici scopi. Qui di seguito alcuni esempi:

- Scansione dei messaggi. il segnale acustico può fornire un suono di anteprima per ciascun messaggio durante il processo di scansione.
   Questo processo è chiamato "scansione uditiva".
- Presentazione del nuovo vocabolario. Alcune parole e concetti sono difficili da illustrare visivamente. Un segnale acustico può facilitare la comprensione di messaggi come "per favore" o "vuoi" o un'immagine di complessa interpretazione.
- Deficit visivo. Un segnale acustico può aiutare una persona non vedente o ipovedente mentre naviga attraverso un libro di comunicazione.
- Messaggi preliminari. Aggiungendo un segnale acustico, un messaggio diventa un'azione in due parti. Il primo tocco riproduce il segnale acustico, mentre un secondo tocco riproduce un messaggio aggiuntivo se è stato aggiunto al messaggio.

# 3.4.7 Copia, incolla, scambia, rimuove, o nascondi posizioni dei messaggi su una pagina

Una volta creato un messaggio, può essere copiato in altre posizioni dei pulsanti disponibili in una pagina di comunicazione. Premi e tieni premuto un messaggio per utilizzare gli strumenti **Copia** e **Incolla** o per scambiare la posizione dei messaggi con lo strumento **Scambia**. Message I messaggi possono essere rimossi da una pagina con lo strumento **Elimina** o nascoste con lo strumento **Disabilita**.

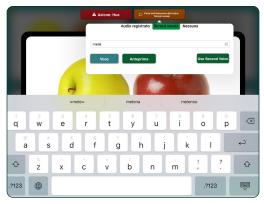


Fig. 3-36 Tap the **Auditory Cue** button to create a message to be used as an Auditory Cue for the Message Location.

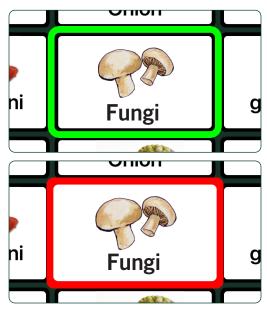


Fig. 3-37 Quando **Parte dell'Anteprima dell'audio** è attivato nelle impostazioni dell'app, il primo tocco su un messaggio riproduce l'audio e il messaggio è evidenziato con un bordo verde. Se toccato nuovamente, l'evidenziazione del bordo diventa rossa e tutte le azioni assegnate a quel messaggio vengono attivate.

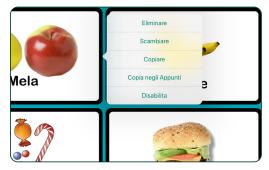


Fig. 3-38 Toccare e tenere premuto un messaggio per **eliminarlo, copiarlo, scambiarlo** o **disabilitarlo**. O anche per copiarlo negli Appunti per poi incollarlo in un'altra pagina.

## 3.4.7 Copia, incolla, scambia, rimuove, o nascondi posizioni dei messaggi su una pagina *(continua)*

- Tieni premuto per selezionare un messaggio e utilizzare lo strumento Copia. Quindi tocca in una posizione diversa e usa lo strumento Incolla. Verranno mantenute tutte le proprietà assegnate a quel messaggio.
- Per scambiare la posizione dei messaggi sulla stessa pagina, premi Scambia sul messaggio e poi premi su un altro messaggio o cella vuota. Le due posizioni dei messaggi si scambieranno.
- Usa **Disabilita** per nascondere un messaggio su una pagina invece di eliminarlo definitivamente.

#### 3.5 Pulsanti Rapidi

La funzione **Pulsanti Rapidi** consente di aggiungere fino a quattro messaggi (o anche fino a 8 se attivate il pulsante nella "Caratteristiche Sperimentali" nelle Impostazioni) che saranno disponibili in tutte le pagine di un libro per la comunicazione.



Fig. 3-39 Tocca il pulsante **Pulsanti rapidi** per creare dei messaggi che saranno disponibili in tutto il libro per la comunicazione.

#### 3.6 Gestisci pagine e modelli

Apri **Pagine** per andare a un'altra pagina, o premi Modifica per riorganizzare o eliminare pagine nell'elenco. Utilizza la Galleria modelli per aggiungere nuove pagine in base a un layout di pagina esistente (vedi pagina 21 per ulteriori informazioni sui modelli).

Se si vuole aggiungere una pagina come "pagina iniziale" bisogna trascinarla fino alla prima posizione in alto (prima di tutte le altre pagine).

Per eliminare una pagina dal libro per la comunicazione, tocca il pulsante di eliminazione rosso accanto all'etichetta della pagina. La pagina attualmente visualizzata non può essere cancellata, se la si vuole eliminare, bisogna prima selezionare un'altra pagina e poi si potrà eliminare.



Fig. 3-40 Toccare una delle etichette di pagina elencate per accedere a quella pagina del libro per la comunicazione. Tocca **Modifica** per riordinare o rimuovere delle pagine.



Fig. 3-41 Per eliminare una pagina dal libro per la comunicazione, tocca il pulsante di eliminazione rosso accanto all'etichetta della pagina. Per spostare una pagina, toccare e tenere premuta la barra di trascinamento accanto a una pagina elencata e spostarla in una nuova posizione nell'elenco.

# Creazione di pagine di comunicazione con una scena interattiva

Questa funzione ci permette di aggiungere ad un'immagine di sfondo delle 'aree attive con suoni' che possono essere selezionate e utilizzate come mezzo di comunicazione; questo è un meraviglioso strumento di comunicazione per le persone con autismo, afasia, aprassia, disabilità dello sviluppo o chiunque voglia migliorare un linguaggio ricettivo o di memoria visiva.

E' possibile aggiungere/tracciare dei pulsanti attivi (chiamati Hotspot) in qualunque punto dell'immagine/ foto della dimensione desiderata. Gli Hotspot possono diventare collegamenti per altre pagine o semplicemente abilitare un suono/audio. Rispetto ad un tradizionale Layout di pagina, questo sistema di comunicare può essere meno confusionale per alcune persone, rendendo più facile individuare un oggetto/ pulsante per la comunicazione.

Per creare una pagina di comunicazione con una scena interattiva, utilizza l'opzione Aggiungi una pagina Immagini vuota dal menù Nuova Pagina. Scegli un'immagine per la pagina e aggiungi gli hotspot sensibili al tocco.

- Aprire il menù Nuova Pagina e selezionare e poi Aggiungi una pagina Immagini vuota.
- 2. Premi il pulsante nell'angolo in basso a destra per impostare l'immagine della scena. Scegli un'immagine dalla libreria di immagini GoTalk o da altre librerie (se presenti o acquistate), dalla libreria di foto dell'iPad o da una ricerca su Internet. Puoi anche utilizzare la fotocamera dell'iPad per scattare una foto per la pagina.
- Trascina, allarga o riduci con le dita l'immagine per regolare le dimensioni e la posizione sulla pagina.
- 4. Per bloccare l'immagine in posizione sulla pagina, premi nuovamente il pulsante quindi toccare **Blocca immagine** per evitare che l'immagine si sposti mentre si aggiungono punti di accesso alla pagina.



Fig. 4-1 Una **pagina di comunicazione con una scena** interattiva utilizza punti di accesso sensibili al tocco (Hot spot) per attivare le azioni.



Fig. 4-2 Selezionare **Aggiungi una pagina Immagini vuota** dal menù Nuova Pagina per creare una pagina di comunicazione con una scena interattiva.



Fig. 4-3 **L'immagine della pagina** può essere scelta dalla libreria fotografica del tuo iPad, dalla libreria di immagini di GoTalk o da altre librerie di simboli se presenti o se le avete acquistate in precedenza nel negozio, da una ricerca su Internet o scattata con la fotocamera dell'iPad.

Section 4
Creazione di
pagine con una
scena interattiva

- 5. Toccare il pulsante per aggiungere un punto di accesso (hot spot) alla pagina. Trascina o pizzica il punto di accesso per regolare le dimensioni e la posizione sull'immagine.
- 6. Premere il punto di accesso per aprire una scheda per l'impostazione delle azioni. Gli stessi media e le stesse navigazioni utilizzate per le posizioni dei messaggi possono essere aggiunte ai punti di accesso delle immagini. È possibile aggiungere fino a 25 punti di accesso a pagina di comunicazione con una scena interattiva.



Fig. 4-4 Posiziona i **punti di accesso (hot spot)** sull'immagine e aggiungi azioni come faresti per una cella con un messaggio.

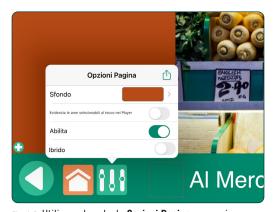


Fig. 4-5 Utilizzare la scheda **Opzioni Pagina** per aggiungere un **colore di sfondo** se l'immagine non riempie l'intera pagina. Attiva **Evidenzia le aree selezionabili al tocco nel Player** per rendere visibili i punti di accesso (hot spot) nella modalità utente.

## 4.1 Aggiungi dei messaggi in una pagina di comunicazione con una scena interattiva

Utilizzare l'impostazione **Ibrido** nelle **Opzioni Pagina** per aggiungere una riga di un massimo di quattro pulsanti messaggio ad una pagina di comunicazione con una scena interattiva. Per poter abilitare l'opzione "**Ibrido**" l'immagine di sfondo che avete aggiunto deve essere ridotta per non occupare l'intera superficie della schermata. Utilizzare l'impostazione **Orientamento** per posizionare la riga dei messaggi sul lato sinistro, destro, superiore o inferiore della Pagina scena.

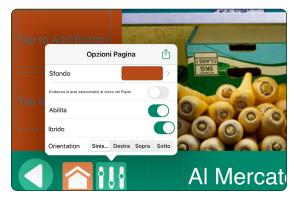


Fig. 4-6 Utilizzare la scheda **Opzioni Pagina** per creare una **pagina di comunicazione con una scena interattiva ibrida.** È possibile aggiungere fino a quattro messaggi.



Fig. 4-7 Le posizioni dei messaggi possono essere aggiunte ai lati sinistro, destro, superiore o inferiore di una pagina di comunicazione di scene ibride.

## Usare le pagine della tastiera

Nella Pagina Tastiera se utilizzate la modalità a scansione saranno attivati solo i pulsanti di navigazione della pagina. Le pagine della tastiera dispongono di una barra dei messaggi per digitare i messaggi con la tastiera dell'iPad con la previsione della parola incorporata. I messaggi digitati possono essere ascoltati con la sintesi vocale. Aggiungi la **Pagina per Tastiera** dal menù **Nuova Pagina**. Più di una pagina per tastiera può essere aggiunta allo stesso libro per la comunicazione. Non è possibile apportare modifiche alle pagine per dimensioni o stile del testo. Il titolo della pagina "Pagina Tastiera" non può essere modificato/rinominato.



Fig. 5-1 Seleziona **Pagina Tastiera** dal menù **Nuova Pagina** per creare una pagina di comunicazione che permetta di digitare i messaggi con la tastiera dello schermo dell'iPad.



Fig. 5-2 Digitazione dei caratteri nella **barra dei messaggi** con la tastiera dell'iPad.



Fig. 5-3 Toccare  $\bigcirc$  per ascoltare il messaggio digitato con la sintesi vocale. Il messaggio sarà disponibile per la riproduzione fino a quando non verranno digitate nuove parole nella barra dei messaggi.



## **Utilizzo di Pagine Express**

Per essere aggiunto alla barra dei messaggi, un messaggio deve avere un Audio registrato o Sintesi vocale come azione assegnata.

Le pagine Express utilizzano una barra dei messaggi per combinare i messaggi selezionati e riprodurli in sequenza. Toccando un messaggio, lo si aggiunge alla barra dei messaggi.

## 6.1 Aggiunta di Pagine Express al tuo libro per la comunicazione

Con una pagina di comunicazione aperta in Modifica Pagina, premere il pulsante Opzioni Pagina e attivare l'impostazione Pagina Express (Figura 6-1). Una barra dei messaggi verrà posizionata nella pagina per la comunicazione. Per rimuovere la barra dei messaggi, tornare alle opzioni pagina e disattivare l'impostazione pagina express.

## 6.2 Utilizzo della barra dei messaggi in modalità Utente

Quando la barra dei messaggi appare in una Pagina per la comunicazione, premendo una cella con un messaggio la si aggiunge alla barra dei messaggi. Non c'è limite al numero di messaggi aggiunti alla barra dei messaggi e possono essere aggiunti più di una volta. Per rimuovere l'ultimo messaggio aggiunto, tocca il pulsante Elimina sulla barra dei messaggi. Per rimuovere tutti i messaggi, toccare e tenere premuto il pulsante Elimina.

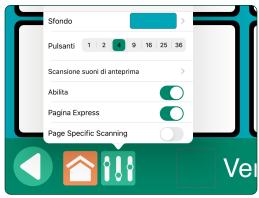


Fig. 6-1 Attiva **Pagina Express** dal pulsante **Opzioni pagina** per aggiungere la barra dei messaggi a una Pagina per la comunicazione.

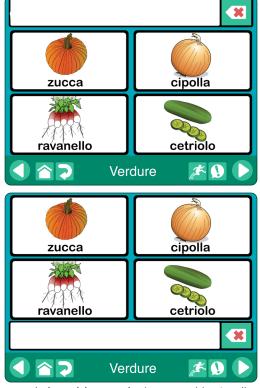


Fig. 6-2 La barra dei messaggi può essere posizionata nella parte superiore o inferiore di una Pagina Express.

Sezione 6 Utilizzo di Pagine Express



dei pulsanti di navigazione/interfaccia è in uso (attivata nelle impostazioni dell'app), il primo tocco su una posizione del messaggio riprodurrà il segnale audio e una seconda pressione aggiungerà il messaggio alla barra dei messaggi della pagina express.

#### 6.2 Utilizzo della barra dei messaggi per l'utente (continua)

Per riprodurre tutti i messaggi aggiunti come un singolo messaggio, toccare ovunque nella barra dei messaggi. Per ascoltare nuovamente il messaggio, tocca il pulsante di ripetizione nella barra dei messaggi . Quando la barra dei messaggi è vuota, la sequenza può essere ripetuta o sostituita con un nuovo messaggio.

## 6.3 Caratteristiche opzionali della Pagina Express

Utilizza le **Impostazioni** dell'app per le funzioni opzionali della Pagina Express.

- Posizione della barra Express. Cambia la posizione della barra dei messaggi in alto o in basso per tutte le pagine del libro.
- Crea le nuove pagine come pagine Express. Quando è attivato, ogni nuova pagina creata per un libro includerà la barra dei messaggi.
- Leggi di seguito i messaggi vocali. Una volta attivata, una serie di messaggi di sintesi vocale verrà letta come una singola frase. Quando è spento, si verificherà una pausa tra ogni singolo messaggio.
- Leggi le singole lettere come parole intere. Quando è attivato, una serie di singole lettere nella barra dei messaggi verrà letta insieme per formare una parola. NOTA: anche l'impostazione dell'app "Leggi di seguito i messaggi vocali" deve essere attivata.

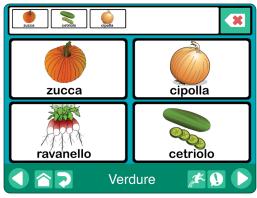


Fig. 6-3 Toccare un messaggio per aggiungerlo alla **barra dei messaggi.** Tocca il pulsante Elimina per rimuovere l'ultimo messaggio aggiunto. Toccare ovunque nella barra dei messaggi per riprodurre il messaggio creato.



Fig. 6-4 Se la scansione è in uso, viene visualizzato un pulsante di eliminazione aggiuntivo. Il pulsante in alto (verde) rimuove l'ultima posizione del messaggio aggiunta alla barra dei messaggi. Il pulsante in basso (rosso) cancellerà l'intera barra dei messaggi.



Fig. 6-5 Dopo la riproduzione di un messaggio, il pulsante di **ripetizione del messaggio** appare per ripetere la riproduzione della barra dei messaggi. Il contenuto del messaggio è conservato in memoria fino a quando non viene creato un nuovo messaggio.

#### 6.4 Condivisione del contenuto della barra dei messaggi

La sequenza dei messaggi collocati nella barra dei messaggi può essere acquisita come immagini e inviata via e-mail o come messaggio di testo. Toccare e tenere premuto sulla barra dei messaggi per aprire la finestra **Condividi** e selezionare una delle opzioni disponibili. Tutte le immagini/testo messaggi utilizzate per il messaggio saranno incluse nell'immagine.



Fig. 6-6 Premere e tenere premuta la barra dei messaggi della Pagina Express per condividere il messaggio.



Fig. 6-7 II messaggio di Pagina Express completo (con immagini e testo) viene consegnato come un file immagine.



# Creazione e condivisione di modelli di pagina

Le pagine per la comunicazione possono essere salvate come **modello** che diventa un insieme di pagine predefinite le quali possono essere aggiunte a un libro per la comunicazione. Un modello può contenere fino a 10 pagine. Più di un modello può essere applicato a un singolo libro. I modelli che crei sono memorizzati nella galleria **I Miei Modelli** dell'app.

#### 7.1 Crea un modello

Premi il pulsante **Gestisci pagine** per aprire la scheda Pagine, premi + nella parte superiore della finestra della scheda, quindi seleziona **Miei Modelli** dall'elenco di scelte. Tocca **Crea nuovo Modello** per nominare e aggiungere fino a dieci pagine a un nuovo modello.

- Nome. Il nome inserito verrà utilizzato nell'elenco Miei Modelli.
- Descrizione. La descrizione viene visualizzata nell'elenco Miei Modelli e viene utilizzata per le ricerche nella galleria.
- Autore. Il nome dell'autore viene visualizzato nell'elenco Miei Modelli.
- Pagine. Scegli fino a 10 pagine dal Libro delle comunicazioni attuale, quindi tocca Fatto.
- Schermata. Scegli una pagina come icona del modello nell'elenco I Miei Modelli.

Quando tutte le informazioni del modello sono complete, toccare **Crea** per salvare il nuovo modello nella galleria dei **Miei Modelli.** 



Fig. 7-1 Per creare un modello di pagine prefabbricate, vai a **Crea nuovo modello** dalla galleria di modelli.



Fig. 7-2 Utilizzare la scheda **Nuovo modello** per salvare fino a 10 pagine da un libro di comunicazione esistente. Scegli una delle pagine per visualizzare un'icona nell'elenco dei modelli.

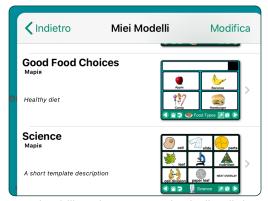


Fig. 7-3 I modelli creati vengono memorizzati nella galleria dei **Miei modelli** dove sono disponibili come contenuto per i nuovi libri per la comunicazione.



Sezione 7 Creazione e condivisione di modelli di pagina

## 7.2 Condividi i modelli tramite e-mail

Premi il pulsante **Gestisci pagine** per aprire la scheda Pagine, premi + nella barra del titolo della scheda per aprire il menù **Nuova Pagina**. Scegli i Miei Modelli per visualizzare i modelli disponibili.

- · Seleziona il modello da condividere.
- Scegli l'icona della busta nelle opzioni
   Condividi. Un modulo E-mail si aprirà sul tuo iPad.
- Inserisci un indirizzo E-mail e invia il link per il download del modello.

#### 7.3 Condivisione Online Gallery

I modelli di pagina possono essere aggiunti a una Galleria pubblica per la condivisione con altri utenti GoTalk NOW. Oppure puoi creare un modello di Galleria privata che richiede un codice di accesso per la condivisione.

Premi il pulsante **Gestisci pagine** per aprire la scheda Pagine, quindi tocca — nella barra del titolo della scheda per aprire il menù **Nuova Pagina**. Seleziona **I miei modelli** per visualizzare i modelli disponibili.

- Seleziona il modello da condividere.
- Toccare l'icona a forma di nuvola nelle opzioni Condividi. Si aprirà la finestra Carica nella Galleria modelli online.
- Selezionare Galleria pubblica o Galleria privata.

#### 7.3.1 Aggiungere modelli alla galleria pubblica

Se un modello viene caricato nella **Galleria pubblica**, sarà disponibile per tutti gli utenti di **GoTalk NOW**. Una volta che un modello è stato aggiunto alla Galleria pubblica, non può essere modificato o rimosso

#### 7.3.2 Aggiungere modelli a una galleria privata

Se un modello viene caricato nella **Galleria privata**, sarà disponibile solo per le persone che conoscono il codice di condivisione assegnato alla tua galleria.



Fig. 7-4 Per utilizzare la posta elettronica per consegnare un modello, selezionare un modello e toccare l'icona della busta nella barra di selezione **Condividi**.

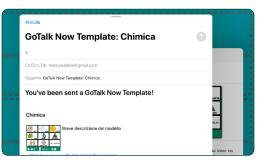


Fig. 7-5 **TL'email GoTalk NOW Modelli** include la descrizione del modello e fornisce un collegamento per il download per un iPad con l'app GoTalk NOW.



Fig. 7-6 Seleziona **Galleria pubblica** per caricare un modello nella galleria pubblica online.



Fig. 7-7 Per richiedere l'uso di un codice di accesso, utilizzare la **Galleria privata** per la condivisione dei modelli.

Sezione 7 Creazione e condivisione di modelli di pagina

## 7.4 Usa pagine prefabbricate gratuite dalla Galleria online

La **Galleria online** è una fonte di pagine prefabbricate gratuite che ti aiuteranno a conoscere le funzionalità interattive possibili con **GoTalk NOW**.

Premi il pulsante **Gestisci pagine** e utilizza il pulsante in nella barra del titolo della scheda per aprire il menù **Nuova Pagina.** Seleziona **Galleria Online** per individuare e scaricare modelli di pagina gratuiti.

- Galleria privata. Gli utenti GoTalk NOW possono condividere modelli di pagina tra loro fornendo il codice di condivisione alla loro galleria.
- In primo piano. Questa galleria include modelli di pagina creati dai membri dello staff di Attainment Company che dimostrano le funzionalità interattive di GoTalk NOW.

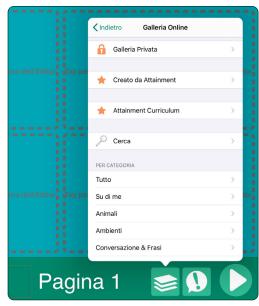


Fig. 7-8 Utilizzare la Galleria Online per scaricare modelli di pagina gratuiti.

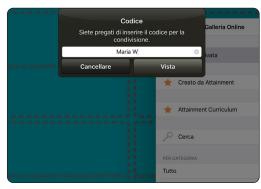


Fig. 7-9 I modelli per la Galleria privata non sono elencati per nome nella Galleria in linea. Il **codice di condivisione** è richiesto per visualizzare e utilizzare i modelli nella galleria.

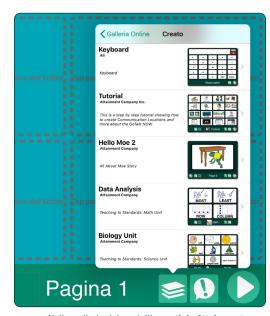


Fig. 7-10 Nella galleria dei modelli **creati da Attainment** sono presenti pagine predefinite che dimostrano le funzionalità interattive possibili con GoTalk NOW.

Sezione 7 Creazione e condivisione di modelli di pagina

#### 7.4 Usa pagine prefabbricate gratuite dalla Galleria online (continua)

- Curriculum di Attainment. Set di pagine di comunicazione che si collegano al curriculum di Attainment in queste aree: arti della lingua inglese, matematica, scienze, studi sociali e transizione.
- Galleria pubblica. Immettere un termine di ricerca, selezionare una categoria o visualizzare tutti i modelli forniti dalla comunità di utenti GoTalk NOW. Queste pagine di comunicazione predefinite sono ottimi modi per ottenere idee su come creare le tue pagine.

Dopo aver trovato e selezionato un modello di pagina, premi sull'icona **Scarica** per posizionare il modello nel gruppo **Download Modelli.** 

Tocca l'icona **Aggiungi al libro di comunicazione** per aggiungere
il modello scaricato al libro di
Comunicazione che hai aperto.

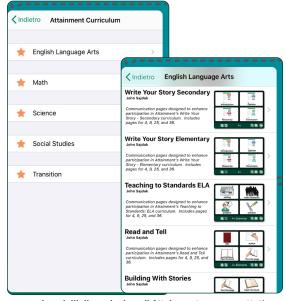


Fig. 7-11 **I modelli di curriculum di Attainment** sono progettati per essere utilizzati insieme alle lezioni di Attainment.



Fig. 7-12 Nella **Galleria pubblica** ci sono modelli creati da utenti di GoTalk NOW in tutto il mondo. Cerca per parole chiave o scegli una categoria per restringere l'elenco dei modelli di pagina disponibili.





Fig. 7-13 I modelli scaricati vengono inseriti nel gruppo **Download Modelli** e possono essere utilizzati per creare nuove pagine GoTalk NOW.



# GoTalk NOW LITE and GoTalk Start do not allow book and template sharing. Those two apps are limited to a single Communication Book. The book title is not shown on the Home screen and the library list view is not available.

# Creazione, rimozione e condivisione di libri per la comunicazione

Premi il titolo del libro nella parte inferiore della schermata iniziale per visualizzare un elenco dei libri per la comunicazione nella libreria di **GoTalk NOW**. Se non sono stati creati libri, il libro predefinito con una singola pagina vuota verrà visualizzata nella libreria. Ci sarà sempre almeno un libro elencato; non è possibile cancellare tutti i libri nella libreria.

Per creare un nuovo libro per la comunicazione, premere + in alto a sinistra nella finestra della scheda dall'elenco delle librerie.

Premi **Modifica** per modificare l'ordine dell'elenco dei libri nella libreria. Tocca e tieni premuta l'icona di una barra di trascinamento del titolo di un libro per spostare il libro in una nuova posizione nell'elenco.

Pizza Toppings from David's iPad (3) Giochi Storia C Food Choices C Healthy Food Choices Core Words-9 ELA From John S Scienza Attainment C Libro Italiano C Scienza

Fig. 8-1 Tap the book title at bottom of the Home screen to open the **library of Communication Books**. Select the book title to be active in the Player or Page Editor.

Premi l'icona **Condividi** accanto a un titolo del libro elencato per utilizzare altri strumenti di gestione dei libri.

- Cancellare. Premi per eliminare il libro dalla libreria GoTalk NOW. Il libro attualmente selezionato non può essere cancellato (deselezionalo, quindi cancellalo).
- Rinomina. Premi per cambiare o sostituire il titolo del libro.
- Duplicato. Premi per creare un duplicato del libro con un nuovo nome.
- Condividi Libro compresso. Premi per inviare una copia del libro di comunicazione a un altro utente di GoTalk NOW. Il libro non sarà compresso se caricato su un altro iPad.
- Esporta file PDF. Premi per convertire le pagine di comunicazione in un file PDF. Per la consegna del PDF viene fornito un modulo di posta elettronica con un link per il download di PDF.
- Backup / Restore. I tuoi libri per la comunicazione possono essere salvati sul tuo computer attraverso servizi di condivisione di file come iTunes (tramite PC/MAC con cavo USB) e Dropbox.

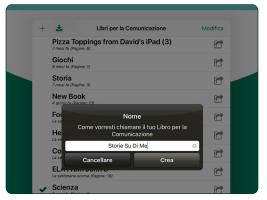


Fig. 8-2 Start a new Communication Book by typing its name and tapping the Create button. A newly created Communication Book starts with a single blank page.

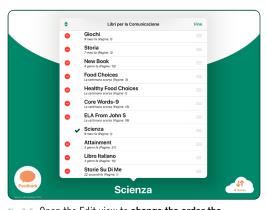


Fig. 8-3 Open the Edit view to **change the order the Communication Books** with the drag bar icons next to each title. Use the red delete icon to **remove books** from the app.



Sezione 8
Creazione,
rimozione e
condivisione
di libri per la
comunicazione

#### 8.1 Condivisione della trasmissione su una rete WiFi

Quando due o più iPad con **GoTalk NOW** si trovano sulla stessa rete WiFi, un iPad può inviare libri di comunicazione ad altri iPad con la funzione **Broadcast.** 

#### Invio:

- Seleziona il libro di comunicazioni da condividere con gli iPad sulla stessa rete WiFi e chiudi l'elenco dei libri. Il titolo del libro selezionato dovrebbe apparire nella parte inferiore della schermata principale
- 2. Premere il pulsante **GoTalk NOW** (in alto) sulla schermata principale per iniziare la trasmissione WiFi.

#### Ricezione:

- 1. Su un iPad collegato in rete con l'app GoTalk NOW, aprire l'elenco della scheda della libreria dei libri di comunicazione premendo il titolo del libro nella parte inferiore della schermata principale.
- 2. Toccare l'icona Pull in alto a sinistra nella scheda libri di comunicazione. Apparirà una finestra pop-up chiamata Seleziona altri GoTalk Now.
- **3.** Selezionare il libro delle comunicazioni trasmesso. Apparirà un nuovo pop-up con un pulsante **Pull**.
- 4. Toccare il pulsante Pull e attendere che l'iPad si connetta e che il libro delle comunicazioni sia trasferito. Il processo è completo quando il libro appare nell'elenco delle librerie della scheda Libri di comunicazione dell'iPad ricevente.





Fig. 8-4 Communication Books are easily shared with another iPad on the same WiFi network. Start by selecting a book in the library list. Then return to the Home screen and tap the GoTalk NOW button to **broadcast** the book.



Fig. 8-5 On the **receiving iPad** using the same WiFi network, open the GoTalk NOW book library and tap the Pull icon. The broadcasted Communication Book will be available for downloading.

#### 8.2 Condivisione con AirDrop o e-mail

Seleziona il libro da condividere nell'elenco della libreria, premi l'icona **Condividi** e seleziona **Condividi Libro compresso.** Puoi condividilo istantaneamente con gli utenti iPad nelle vicinanze utilizzando AirDrop, o usa la posta elettronica per consegnare un libro per la comunicazione. Questo serve anche come metodo alternativo per il backup dei libri di comunicazione (vedere pagina 32).

Sezione 8
Creazione,
rimozione e
condivisione
di libri per la
comunicazione

#### 8.2.1 Inviare un libro compresso via e-mail

Un libro di comunicazione può essere inviato per e-mail e aperto in un altro iPad con l'app **GoTalk NOW**. Seleziona il libro da condividere nell'elenco della libreria, premi l'icona **Condividi** e seleziona **Condividi Libro compresso**. Premere l'opzione "Mail" per aprire un messaggio e-mail con il libro di comunicazione allegato come un file compresso con l'estensione del nome "gtbz". Aggiungi un indirizzo email e invia il libro al tuo destinatario.

- 1. Toccare l'allegato del libro e-mail per scaricare il file
- L'icona GoTalk NOW apparirà sopra il file
   \*.gtbz. Tocca per aprire le opzioni di condivisione dell'iPad.
- 3. Toccare Copia su GoTalk ora.

Scienza
GoTalk Book Compressed · 4 KB

AirDrop

Mail

Kindle

Dropbox

Sla



Fig. 8-6 After downloading completes, the shared book must be named for the receiving app. The name can be the same or different as the original book.

**4.** Digitare il nome di un libro nel pop-up **Nome nuovo libro di comunicazione.** Il nome può essere uguale o diverso dal libro condiviso. Premi **Crea** e il libro apparirà nell'elenco dei libri.

#### 8.2.2 Invia un libro compresso tramite AirDrop

AirDrop è un'opzione di condivisione wireless iPad integrata per iPad nelle immediate vicinanze. Invece di selezionare "Posta" dalle opzioni di condivisione, selezionare uno dei nomi elencati nell'elenco AirDrop. Quella persona riceverà un messaggio sull'iPad dicendo che il libro è disponibile per la loro app **GoTalk NOW**. AirDrop deve essere acceso per ciascun iPad. *AirDrop può essere utilizzato per iPad 4 e successivi*.

#### 8.2.3 Condividi tramite Webserver

Se la condivisione e-mail non è possibile, il metodo web server può essere utilizzato per caricare e scaricare libri compressi utilizzando un computer Mac o PC che si trova sulla stessa rete WiFi. Contattare l'azienda di supporto per assistenza nell'impostazione del metodo di condivisione del server web.

# 8.3 Esportazione di un libro di comunicazione come pagine PDF

Per creare una versione PDF di un libro di comunicazione, selezionare il libro nell'elenco libreria e premere l'icona **Condividi** con. Seleziona **Esporta file PDF** dalle opzioni visualizzate. Il PDF sarà disponibile tramite un link per il download via email.





Fig. 8-7 To create a PDF version of your Communication Book, select **Export PDF** from the sharing options. GoTalk NOW creates an email for sending a PDF download link for the book.



# Esecuzione del backup dei tuoi libri per la comunicazione

I libri per la comunicazione possono essere salvati sul tuo computer tramite iTunes o salvati su un servizio di file come Dropbox o Google Drive.

#### 9.1 Backup sul computer con iTunes

Se Apple iTunes è sul tuo computer, puoi utilizzare la condivisione di file di iTunes per copiare file tra il tuo computer e il tuo iPad. NOTA: i Mac dal 2019 o successivi non usano iTunes; vedere 9.1.1 pagina successiva.


## Salvare un libro di comunicazione sul computer utilizzando iTunes:


- 1. Chiudi l'app **GoTalk NOW**. Collega l'iPad al computer utilizzando la porta USB.
- 2. Apri iTunes sul tuo computer e seleziona l'iPad dalla barra dei menu di iTunes *Vedi Esempio 1*
- **3.** Apri un elenco delle tue app per iPad facendo clic su "Condivisione file" nell'elenco delle impostazioni. *Vedi Esempio 2*
- 4. Scorri verso il basso fino alla sezione "Condivisione file" e seleziona "GoTalk NOW" dall'elenco di applicazioni visualizzate. Verrà visualizzato un elenco dei tuoi libri per la comunicazione. Seleziona il libro di cui eseguire il backup e salvalo nel percorso di una cartella sul tuo computer. Vedi Esempio 3

**Mac:** dtrascina il libro in una cartella o usa il pulsante "Salva..."

Windows: usa il pulsante "Salva..."



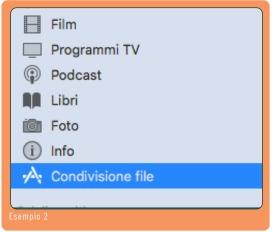

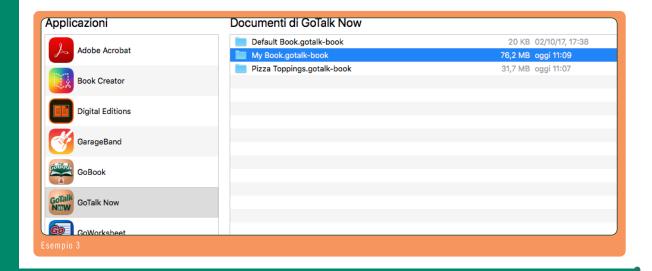




#### 9.1 Backup di un libro per la comunicazione con Condivisione file iTunes (continua)

#### Ripristina un libro salvato utilizzando iTunes:

- 1. Chiudi l'app GoTalk NOW. Collega l'iPad al computer utilizzando la porta USB.
- 2. Apri iTunes sul tuo computer e seleziona l'iPad dalla barra dei menu di iTunes.
- 3. Apri un elenco delle tue app per iPad facendo clic su "App" nell'elenco delle impostazioni.
- **4.** Scorri verso il basso fino alla sezione "Condivisione file" e seleziona "GoTalk NOW" dall'elenco di app visualizzate
- Trascina la cartella del libro salvato in precedenza dalla sua posizione sul PC/MAC e rilasciala nella cartella documenti di GoTalk NOW di iTunes.


  Vedi Esempio 4
- 6. Apri l'app GoTalk NOW sul tuo dispositivo. Il libro delle comunicazioni ripristinato sarà ora disponibile nell'elenco dei libri per la comunicazione. Vedi Esempio 5

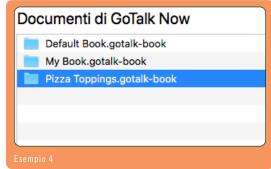



#### 9.1.1 Backup sul computer tramite il Finder

Se stai utilizzando un MacOS dal 2019 o successivo, iTunes non è disponibile, ma la condivisione dei file è integrata tramite il **Finder** . Quando l'iPad è collegato, viene visualizzato in "Posizioni" e i suoi file sono elencati. Individua la cartella **GoTalk NOW,** quindi copia / incolla o trascina i file del libro di comunicazione in una cartella sul tuo computer desktop. *Vedi Esempio 5b* 

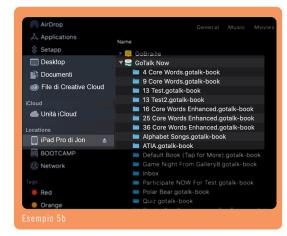

#### 9.2 Backup con Dropbox o Google Drive

Dropbox e Google Drive sono servizi di archiviazione online che si connettono a **GoTalk NOW.** Le app possono essere scaricate gratuitamente sul tuo iPad. È necessario impostare un account utente prima di eseguire il backup dei libri.

#### Salvare un libro per la comunicazione utilizzando Dropbox o Google Drive

- Inizia dalla schermata Home di GoTalk NOW.
   Tocca il titolo del libro per aprire l'elenco di libri per la comunicazione presenti sul tuo iPad, e seleziona il libro di cui eseguire il backup.
- 2. Toccare il pulsante Backup in basso a destra nella schermata principale. Apparirà la domanda "Computer o Dropbox?". Seleziona Via Dropbox o Con Google Drive per avviare il processo di backup. Vedi Esempio 6
- 3. Se è la prima volta che usi Dropbox con **GoTalk NOW**, tocca Collega account Dropbox e fornisci le informazioni del tuo account Dropbox. Se si utilizza Google Drive, sarà necessario accedere con il proprio account Google.
- **4.** Tocca **Backup su Dropbox/Google Drive** dalla finestra pop-up. *Vedi Esempio 7*
- 5. Se questo è il primo backup da aggiungere alla tua cartella Dropbox/Google Drive, verrà visualizzata una finestra pop-up che ti chiederà di nominare il backup. Il nome esistente può essere conservato o modificato. Tocca il pulsante Crea per continuare il processo di backup.

Vedi Esempio 8









#### 9.2 Backup di un libro per la comunicazione con Dropbox (continua)

- 6. Se esistono altri backup di Dropbox/Google Drive, verrà visualizzata una finestra popup che richiede di creare una nuova cartella di backup o di utilizzare una cartella esistente. L'utilizzo di una cartella esistente sostituirà il libro precedentemente sottoposto a backup in quella posizione. Tocca il nome della cartella per avviare il processo di backup. Toccare il pulsante Crea nuovo per creare una nuova cartella di backup con un nome diverso e avviare il processo di backup toccando il pulsante Crea Nuovo. Vedi Esempio 9
- 7. Al termine del caricamento, la cartella del libro apparirà nella sezione App / GoTalk NOW della cartella di archiviazione Dropbox/Google Drive.



## Ripristina un messaggio di comunicazione salvato utilizzando Dropbox:

- 1. In GoTalk NOW, vai all'elenco dei Libri per la comunicazione e tocca in alto angolo sinistro della finestra. Nel pop-up che appare, inserisci il nome del libro. Questo può essere uguale o diverso dal nome del libro nella cartella Dropbox/Google Drive. Tocca Crea per aggiungere il libro titolo alla libreria GoTalk NOW Vedi Esempio 10
- 2. Toccare il pulsante Backup in basso a destra nella schermata principale. Apparirà la domanda "Computer o Dropbox?". Tocca il pulsante Via Dropbox o con Google Drive. Vedi Esempio 11







#### 9.2 Backup di un libro per la comunicazione con Dropbox (continua)

- Un pop-up ti chiederà se vuoi "Backup" o "Ripristino" di un libro. Tocca il pulsante Ripristino da Dropbox o Ripristino da Google Drive. Vedi Esempio 12
- 4. Apparirà un pop-up che ti chiederà di selezionare "Backup" con un elenco di libri disponibili nel tuo Dropbox/Google Drive. Tocca il titolo del libro per avviare il processo di download. Al termine, il titolo del libro sarà aggiunto al tuo elenco dei libri per la comunicazione. *Vedi Esempio 13*



## 9.3 Opzione aggiuntive di backup su cloud

Un altro modo per eseguire il backup e il ripristino di un libro di comunicazione è toccare il pulsante **Condividi**, toccare "Condividi libro compresso", quindi salvarlo su un sito di archiviazione come iCloud, OneDrive, Google Drive, o Dropbox.

Se salvato su un computer o un'unità di archiviazione, i file del libro GoTalk avranno l'estensione .gtbz ("GoTalk Book Zippato"), e possono essere copiati o trascinati in una cartella.



I libri di comunicazione di backup possono essere ripristinati in diversi modi:

- Apri l'app di archiviazione cloud sull'iPad, individua e seleziona il file e tocca tre punti adiacenti o in alto. Cerca "Apri con" o "Esporta", quindi seleziona **GoTalk NOW.**
- Invia il file via AirDrop o per email.
- Utilizzare la condivisione di file (vedere le pagine 28–29).

# Scansione delle selezioni e supporto per l'accesso con sensore/i

Il supporto per la comunicazione aumentativa e alternativa integrato in **GoTalk NOW** include due modalità di scansione:

- Scansione automatica (scansione singola con l'uso di un solo sensore). I pulsanti dello schermo disponibili sono evidenziati in sequenza. Un singolo sensore viene utilizzato per selezionare un pulsante evidenziato. La velocità di scansione è regolabile da 1 a 10 secondi per ciascuna selezione dello schermo.
- Scansione manuale. L'utente utilizza un sensore per controllare il movimento del processo di scansione e un altro sensore per selezionare la cella evidenziata.

Scansione / Cambia tipo di dispositivo. La scansione è disattivata quando nelle Impostazioni e nel menù Scansione il Tipo di Interfaccia per la scansione è impostato su "Nessuna". La scansione è attiva quando è selezionato uno dei seguenti tipi di interfacce per la scansione:



• Sensore Attainment. Interfaccia per la scansione prodotta da Attainment

- Interfaccia per sensori Tasto Tilde e Numero (Era RJ Cooper).
- Interfaccia Bluetooth per sensori Spazio e Invio. Interfacce di vari produttori che emulano il tasto di Spazio e Invio
- Usa lo schermo come un sensore.

**Ripeti scansione:** per impostare la ripetizione della scansione da 1 a 10 volte o perennemente (si riavvia sempre automaticamente).

**Raggruppamento:** Righe o colonne di pulsanti di messaggio su una pagina possono essere incluse nel processo di scansione. Dopo aver selezionato una riga o una colonna, la scansione continua per le singole celle di una riga o colonna.

**Scambia funzionalità.** Quando si utilizza la scansione manuale, i pulsanti di comando sinistro e destro possono essere impostati per fungere da funzione "prossimo" o "seleziona".

**Evidenzia con la scansione i pulsanti di navigazione:** I pulsanti di navigazione del lettore possono essere inclusi o ignorati dal processo di scansione. Per fornire una selezione di pagina, assegna un'azione vai a ad un messaggio sulla pagina.

Riprendi dall'ultima posizione (Disabilitato = dall'inizio): se abilitate questa funzione la scansione ripartirà dall'ultima cella selezionata. Se la lasciate disabilitata la scansione riprenderà ogni volta dall'inizio.

**Impostazioni sensori Attainment:** qui potete trovare varie opzioni se usare l'interfaccia per i sensori di Attainment.

Scansione barra Express. (sotto le Impostazioni della pagina Express) Quando si utilizzano le pagine Express, la barra dei messaggi può essere inclusa o esclusa dal processo di scansione. (Abilitare o meno questa funzione in Impostazioni Pagina Express)

## Impostazioni delle app di GoTalk NOW

Premi Impostazioni dalla schermata Home per abilitare le funzioni di Modifica o regolare le impostazioni per l'utente.

#### PRIVACY (nelle impostazioni dell'iPad)

Usa queste impostazioni per consentire o limitare l'accesso alla fotocamera, al microfono o alla libreria fotografica dell'iPad

Foto: On / Off Microfono: On / Off Fotocamera: On / Off

#### **PULSANTI**

#### Pulsanti di navigazione Sinistra Destra: On / Off

I pulsanti di navigazioni possono essere rimossi dalla schermata di lettura. Assegnare l'azione Vai alla Pagina è un'opzione alternativa per sfogliare le pagine quando i pulsanti di spostamento Destra/Sinistra vengono disattivati.

Pulsante Pagina iniziale (Home): On / Off

Pulsante Indietro: On / Off
Pulsante Vai a: On / Off
Pulsante Rapidi: On / Off

Disabilita lo scorrimento con tre dita: On / Off

Se attivato, l'unico modeo per uscire dalla modalità Utente è premere è tenere premuto il tasto Home per 10 secondi.

Pagina iniziale (Home) azione: Vai alla prima pagina / Esci dall'utente

Il pulsante Home può essere utilizzato per andare alla prima pagina del libro o uscire dall'utente.

#### IMPOSTAZIONI DELL'UTENTE

#### Espandi il pulsante quando è attivato: On / Off

I pulsanti di posizione del messaggio possono diventare più grandi sullo schermo quando selezionati.

#### Sfoglia le pagine con il tocco: On / Off

La gestione delle pagine con il tocco sullo schermo può essere attivata o disattivata.

#### Blocca stand-by: On / Off

Attiva per ignorare le impostazioni generali di iPad per la modalità di sospensione con blocco automatico.

#### Ferma altro Audio: On / Off

Utilizzare questa impostazione per interrompere un'altra sorgente audio (musica, video) dalla riproduzione quando il pulsante del messaggio viene toccato.

#### Tipo di tocco per attivazione pulsanti: Tocco su / Tocco giù

Le impostazioni del tocco dello schermo per l'attivazione del messaggio possono essere "Tocco su" o "Tocco giù"

**Tocca su:** i pulsanti vengono attivati quando il dito si solleva dallo schermo. **Tocca giù:** i pulsanti vengono attivati non appena il dito tocca lo schermo.

#### Segnali sonori di anteprima: Nessuno / Regolazione del Volume / Abbassare il Volume/ Pan / Privato

I segnali sonori di anteprima (feedback acustico) sono suoni preliminari aggiunti a una pagina o un pulsante.

Volume normale: segnale e messaggio riprodotti allo stesso volume.

Volume basso: il segnale viene riprodotto a un volume inferiore rispetto al messaggio del pulsante.

Pan: invia il segnale messaggio al canale destro e il pulsante del messaggio al canale sinistro.

Con uno splitter audio, può inviare un audio alle cuffie mentre altri audio vengono riprodotti attraverso un altoparlante. Privato: il segnale del messaggio viene riprodotto sulle cuffie collegate all'iPad, mentre il messaggio principale viene riprodotto dell'iPad.

#### Salta un suono di anteprima vuoto: On / Off

Quando si utilizzano segnali sonori di anteprima, utilizzare questa impostazione per consentire ai pulsanti di localizzazione dei messaggi senza un segnale acustico di funzionare come un pulsante a tocco singolo. Disattiva questa impostazione quando usi la scansione.

#### Suoni di anteprima dei pulsanti di navigazione / interfaccia: On / Off

È possibile utilizzare segnali acustici per i pulsanti di navigazione dell'utente. Il primo tocco del pulsante fornisce un indizio sulla funzione del pulsante (feedback acustico) e un secondo tocco attiverà l'azione del pulsante.



Sezione 11 Impostazioni delle app di GoTalk NOW

## Imposta i suoni di anteprima dei pulsanti di navigazione / interfaccia: usa nomi predefiniti o crea nuovi nomi

Le indicazioni uditive per i pulsanti di navigazione possono utilizzare i nomi dei pulsanti predefiniti o possono essere modificate utilizzando gli strumenti per Audio registrato o Sintesi vocale.

#### E' richiesta una password per uscire dall'utente: On / Off

Seleziona password: crea un codice di accesso a quattro cifre (la password di default è 0000)

#### Non convertire libri aperti: On / Off

Questa impostazione viene utilizzata per risolvere i problemi di visualizzazione delle immagini durante il trasferimento dei libri un tablet iPad di nuova generazione o più vecchio. L'impostazione predefinita è OFF.

#### Disabilita la previsione sulla pagina tastiera: On / Off

Quando è attivato, le scelte di predizione delle parole non verranno visualizzate sulle pagine della tastiera.

#### **ACCESSIBILITÀ**

#### Ignora pressioni ripetute: None / duration values from 1/4 second to 10 seconds

L'uso di questa impostazione aiuta a prevenire che un pulsante venga ripremuto accidentalmente durante un periodo di tempo assegnato.

#### **SCANSIONE**

#### Tipo dispositivo di scansione: Nessuna (spento) / selezionare il metodo da utilizzare

Il supporto per l'accessibilità GoTalk NOW include i comportamenti di scansione per l'uso di sensori. Attiva la scansione selezionando una delle quattro scelte del tipo di dispositivo.

Sensore Attainment: Interfaccia per la scansione prodotta da Attainment

Interfaccia per sensori di RJ Cooper: Interfaccia per la scansione prodotta da RJ Cooper

Interfaccia Bluetooth per sensori – Spazio e Invio: Interfacce di vari produttori che emulano il tasto di Spazio e Invio
Usa lo schermo come un sensore: Quando si utilizza la scansione automatica, questo trasforma l'iPad in un sensore a un
pulsante (toccare ovunque nello schermo per selezionare l'elemento evidenziato). Quando si è in modalità Scansione manuale,
lo schermo dell'iPad diventa un interruttore a due pulsanti (toccare il tasto sul lato sinistro per avanzare la selezione, toccare sul
lato destro per selezionare).

#### **Scansione automatica:** On / Off (Off = Scansione Step)

Attivare questa impostazione per utilizzare una un sensore singolo per selezionare un pulsante durante la sequenza sullo schermo. Disattiva questa impostazione per utilizzare la Scansione manuale e un interfaccia per due sensori. Il sensore di sinistra si sposterà sulla cella/pulsante successiva e il sensore di destra attiverà la selezione. Un tipo di interfaccia per la scansione deve essere selezionata per la scansione automatica o manuale

#### Inizia la scansione automaticamente: On / Off

Se disattivato, il processo di scansione automatica non inizierà finché non viene attivato un sensore.

**Velocità di Scansione automatica:** Scegli un tempo di durata della scansione da 1 a 10 secondi **Ripeti scansione automatica:** selezionare il numero di volte in cui una pagina verrà sottoposta a scansione

**Gruppi:** nessuna / riga / colonna / quarti per righe / quarti per colonne / metà per righe / Metà per colonne / Scansione quattro per riga / Scansione quattro per colonna

Il processo di scansione può essere personalizzato per consentire la selezione di un gruppo di pulsanti di pagina, dopodiché ciascun pulsante all'interno del gruppo viene scansionato per la selezione.

#### Funzione di scambio: On / Off

Determina le funzioni di selezione per il sensore sinistro e il sensore destro.

**ON:** il sensore destro fa avanzare la scansione e il sensore sinistro viene utilizzato per selezionare.

**OFF:** il sensore di sinistra fa avanzare la scansione e il sensore destro viene usato per selezionare.

#### Evidenzia con la scansione i pulsanti di navigazione: On / Off

I pulsanti di navigazione dell'utente possono essere inclusi o esclusi dal processo di scansione.

#### Riprendi dall'ultima posizione: On / Off

Utilizzare questa impostazione per determinare dove deve continuare il processo di scansione dopo aver attivato un sensore.

**ON:** riprende la scansione dall'ultima selezione.

**OFF:** riprende la scansione nella parte superiore della pagina.

#### Impostazioni sensori Attainment: verde / arancione / giallo / predefinito

Quando si utilizza l'app per sensori di Attainment i colori utilizzati possono essere verdi, arancioni, gialli o utilizzare l'aspetto fornito dall'app del sensore.



Sezione 11 Impostazioni delle app di GoTalk NOW

#### **IMPOSTAZIONI SINTESI VOCALE**

Imposta velocità sintesi vocale: imposta la velocità della voce scegliendo tra: Molto lento, Moderatamente lento, Non molto lento, Normale (modalità predefinita), Non molto veloce, Moderatamente veloce, Molto veloce.

Acapela TTS Amplificazione del volume: Nessuna amplificazione / Leggera amplificazione / Media amplificazione / Amplificazione Alta

#### **IMPOSTAZIONI EDITOR**

Crea i nuovi pulsanti con l'ultimo font usato: On / Off

#### **IMPOSTAZIONI PAGINA EXPRESS**

Posizione della barra Express: In alto / In bass

Disabilita Express ripetizione: On / Off

Se attivato, il pulsante Ripeti (messaggio) viene rimosso dalle pagine con la Barra Express inclusa.

Crea le nuove pagine come pagine Express: On / Off

Leggi di seguito i messaggi vocali: On / Off

I messaggi di sintesi vocale della pagina Express possono essere letti con uno stile di frase normale (ON) o come parole separate (OFF)

Leggi le singole lettere come parole intere: On / Off

L'audio da testo a voce può trattare le combinazioni di lettere della Pagina Express come parole (ON) o come singole lettera suoni (OFF).

Raccolta da destra a sinistra: On / Off

Utilizzare questa impostazione per le lingue che leggono da destra a sinistra (ON) invece che da sinistra a destra (OFF).

Inizia subito dopo la modifica o aggiunta: On / Off

Utilizzare questa impostazione per fare in modo che il messaggio venga letto automaticamente quando viene aggiunto alla barra Express. Funzionalità predefinita: il messaggio viene letto solo dopo che l'utente ha toccato la barra Express

Scansione sulla barra Express: On / Off

Utilizzare questa impostazione se la sequenza di scansione deve includere la barra dei messaggi della pagina Express.

#### **VOICE OVER**

Usa suoni di anteprima come avvisi di VoiceOver: On / Off

Attiva per utilizzare la funzione di accessibilità iOS per i segnali audio sullo schermo. I segnali uditivi rimarranno attivi, ma la narrazione dei pulsanti della pagina non verrà riprodotta.

#### **PULSANTI VIDEO**

Interfaccia semplificata: On / Off

Se è stata aggiunta un'azione multimediale video a un messaggio, i controlli visualizzati sul video player dell'iPad possono essere limitati solo al pulsante di riproduzione e al pulsante di uscita.

Taglia video: On / Off

Attiva per includere lo strumento di modifica del video per poter selezionare solo una parte del video.



Sezione 11 Impostazioni delle app di GoTalk NOW

#### **AMMINISTRATIVO**

Se è richiesto un codice per uscire dall'utente e non ve lo ricordate, seguite questi passaggi per accedere alle impostazioni dell'app 1. Esci da GoTalk NOW.

- 2. Aprire la pagina delle impostazioni di iPad, scorrere la scheda delle impostazioni nell'elenco delle applicazioni e selezionare **GoTalk NOW.**
- 3. Nelle impostazioni dell'app, trovare "Apri il menu di modifica del GoTalk al prossimo riavvio" e abilitarlo (ON-Verde).
- 4. Apri GoTalk NOW e tocca il pulsante Impostazioni nella schermata Home.
- 5. Utilizzare Imposta codice per creare un nuovo codice o utilizzare l'opzione richiesta codice per uscire dal lettore e disattivare il requisito del codice.

Apri il menu di modifica del GoTalk al prossimo riavvio: On / Off

Disabilita ricerca Internet: On / Off

#### **CARATTERISTICHE SPERIMENTALI**

Nascondi immagini (pulsanti con solo testo): On / Off

Utilizzare questa impostazione per visualizzare solo il contenuto del testo assegnato ai messaggi.

Mostra quando sono connessi dei display esterni: On / Off

Quando è attivo, si visualizza un cerchio blu traslucido per evidenziare l'elemento selezionato. Questa visualizzazione si verifica solo quando l'iPad è collegato a un proiettore o ad un altro schermo esterno.

Supporto per Switchamajig: On / Off

Lo Switchamajig è una tecnologia open source per l'utilizzo di un iPad come interfaccia per la scansione e l'uso di sensori o per gestire altri dispositivi. (funzione non più disponibile dal 2018).

Supporto per Quiz: On / Off

Attivala per aggiungere opzioni di quiz alle impostazioni dell'azione del pulsante (corrette, errate, risultati). Permette anche la randomizzazione dei pulsanti della pagina nelle Opzioni della pagina..

Abilita otto pulsanti rapidi: On / Off

Attiva per visualizzare otto messaggi nella funzione del lettore di Pulsanti rapidi.

Quando si è in posizione OFF, appariranno quattro pulsanti.

Ausilio tattile per la conversazione: On / Off

Abilitate questa funzione su avete acquistato il Tactile Talk Toolkit di Attainment Company



#### Downloads di GoTalk NOW

Ulteriori componenti aggiuntivi per GoTalk NOW sono disponibili facendo un tap su **Downloads** pulsante nel **menu principale.** 

Scarica la libreria di immagini GoTalk gratuita (database in inglese) per usufruire di centinaia di illustrazioni di simboli. Per effettuare acquisti in negozio, premi semplicemente il cartellino del prezzo accanto all'elemento aggiuntivo. Una volta effettuato l'acquisto, premi il download per installare il componente aggiuntivo acquistato. Dopo aver scaricato un libro di comunicazione prefabbricati, premerlo per selezionarlo e aggiungerlo all'elenco dei libri per la comunicazione.



Fig. 12-1 II pulsante **Downloads** si trova nella pagina del menù principale e contiene risorse che sono gratuite o disponibili per l'acquisto in app.

#### **Core Words**

I libri gratuiti di **Core Word** sono ideali per iniziare a insegnare la lingua agli studenti. Le pagine di Core Word sono state testate sul campo!



#### Librerie di Immagini

La liberia di immagini GoTalk è inclusa con GoTalk NOW.
Espandi le tue raccolte di immagini con le librerie SymbolStix (inglese), Widgit Symbols (inglese), Widgit Symbols (Italiano),
METACOM (tedeschi), Set di simboli PCS (varie lingue disponibili),
PCS ThinLine (inglese), PCS High Contrast (inglese).



#### Libri di comunicazione prefabbricati

Alla ricerca di un quaderno per iniziare a comunicare? Acquista direttamente uno o più di questi quaderni (disponibili al momento solo in inglese): *Ready-Set-Communicate, Talk All Day, Partecipa ORA, AAC2go GirL, AAC2go Boy, AAC2go Teen* e *Talk tattile.* Creati da specialisti per la comunicazione, questi libri per la comunicazione sono progettati intenzionalmente per consentire di personalizzare e soddisfare le vostre esigenze.



#### Voci per la sintesi vocale

Personalizza i tuoi messaggi di **GoTalk NOW** con una delle tante voci esempi integrati o acquistabili.

VocaliD Voci digitali personalizzate. Per l'uso di una voce digitale personalizzata con GoTalk NOW, selezionare VocaliD Voice disponibili ed inserire le informazioni necessarie sul nome utente e sulla password. Vai a https://vocalid.co per informazioni sulla creazione di voci digitali personalizzate.





## Informazioni sui contatti

Accogliamo le vostre domande o commenti.



P.O. Box 930160 • Verona WI 53593-0160 USA

Contattaci via email: GoTalkNOW@AttainmentCompany.com o chiamaci:

> Stati Uniti e Canada (800) 327-4269

+1 (608) 845-7880

www.AttainmentCompany.com

#### Assistenza per l'Italia

(solo per acquisti della versione completa in lingua italiana realizzata e distrubuita dalla ditta Leonardo Ausilionline srl o contenuta nel comunicatore Comunikit©)

> Forniamo assistenza sul programma e sul suo utilizzo o per altre richieste o eventuali proposte per miglioramenti.



#### Leonardo Ausilionline S.r.l.

Via Alfred Bernard Nobel, 88 42124 REGGIO EMILIA - ITALIA Tel +39 0522 923770 - Fax +39 0522 272586

http://www.leonardoausili.com email: assistenza@ausilionline.it o staff@leonardoausili.com

#### Titoli di coda

Team di sviluppo del contenuto	Parti del codice sono state fornite da:	
Don Bastian	LightMenuBar	Haoxiang Li
Craig Booth	ABPadLockScreen	Aron Bury
Julie Denu	Enormego	
Autumn Garza	Cocoa Helpers	Enormego
Seth Hartwick	SBTableAlert	Simon Blommegård
Barrett Jacobsen	InAppSettingsKit	Luc Vandal & Ortwin Gentz
Jon Karbo	CMPopTipView	Chris Miles
Scott Meister	Asi-Http-Request	All-Seeing Interactive
David Nelson	SDWebImage	Olivier Poitrey
Joni Nygard	TouchJSON	Jonathan Wight
Ali Schlimgen	AQGridView	Jim Dovey
Don Severson	SVProgressHUD	Sam Vermette
Localizzazione per l'Italia	UAModalPanel	Urban Apps
Riccardo Caroppo		
	Don Bastian Craig Booth Julie Denu Autumn Garza Seth Hartwick Barrett Jacobsen Jon Karbo Scott Meister David Nelson Joni Nygard Ali Schlimgen Don Severson Localizzazione per l'Italia	Don Bastian  Craig Booth  ABPadLockScreen  Julie Denu  Enormego  Autumn Garza  Cocoa Helpers  Seth Hartwick  Barrett Jacobsen  Jon Karbo  CMPopTipView  Scott Meister  David Nelson  Joni Nygard  Ali Schlimgen  Don Severson  LightMenuBar  Enormego  Cocoa Helpers  SBTableAlert  InAppSettingsKit  CMPopTipView  Asi-Http-Request  SDWebImage  TouchJSON  AQGridView  SVProgressHUD  Localizzazione per l'Italia  UAModalPanel

